

# SMART FLOOR

De mobiele Smart Floor

# Installatie van de vloer

- Rol de vloer volledig uit met de zwarte kant naar boven, de vloer heeft geen vast begin- of eindpunt
- Let op dat de uiteinden niet omkrullen
- Zorg voor voldoende ruimte aan alle kanten, het lopen mag niet worden belemmerd.
- Houd rekening met een eventuele rollator.
- Geen obstakels op of net naast de vloer, dus leg de vloer niet door een deuropening of tegen een muur
- Zorg dat de onderkant van de vloer niet nat wordt. De vloer dweilen mag wel.

*Zie voor het koppelen van de gebruiker en de loopsensor:*


- *Beknopte uitleg: de pagina's onder het loopprotocol*
- *Uitgebreide uitleg: de Handleiding Vitaliteit*

## Loopinstructies

- Loop op een comfortabele snelheid
- Loop zoals u altijd loopt, het is geen wedstrijd
- Gebruik dezelfde loophulpmiddelen als altijd
- Blijf bij het omkeren op de vloer

# Het loopprotocol: 4x6 meter

- Loop op een comfortabele snelheid
- Loop zoals u altijd loopt, het is geen wedstrijd
- Gebruik dezelfde loophulpmiddelen als altijd
- Blijf bij het omkeren op de vloer

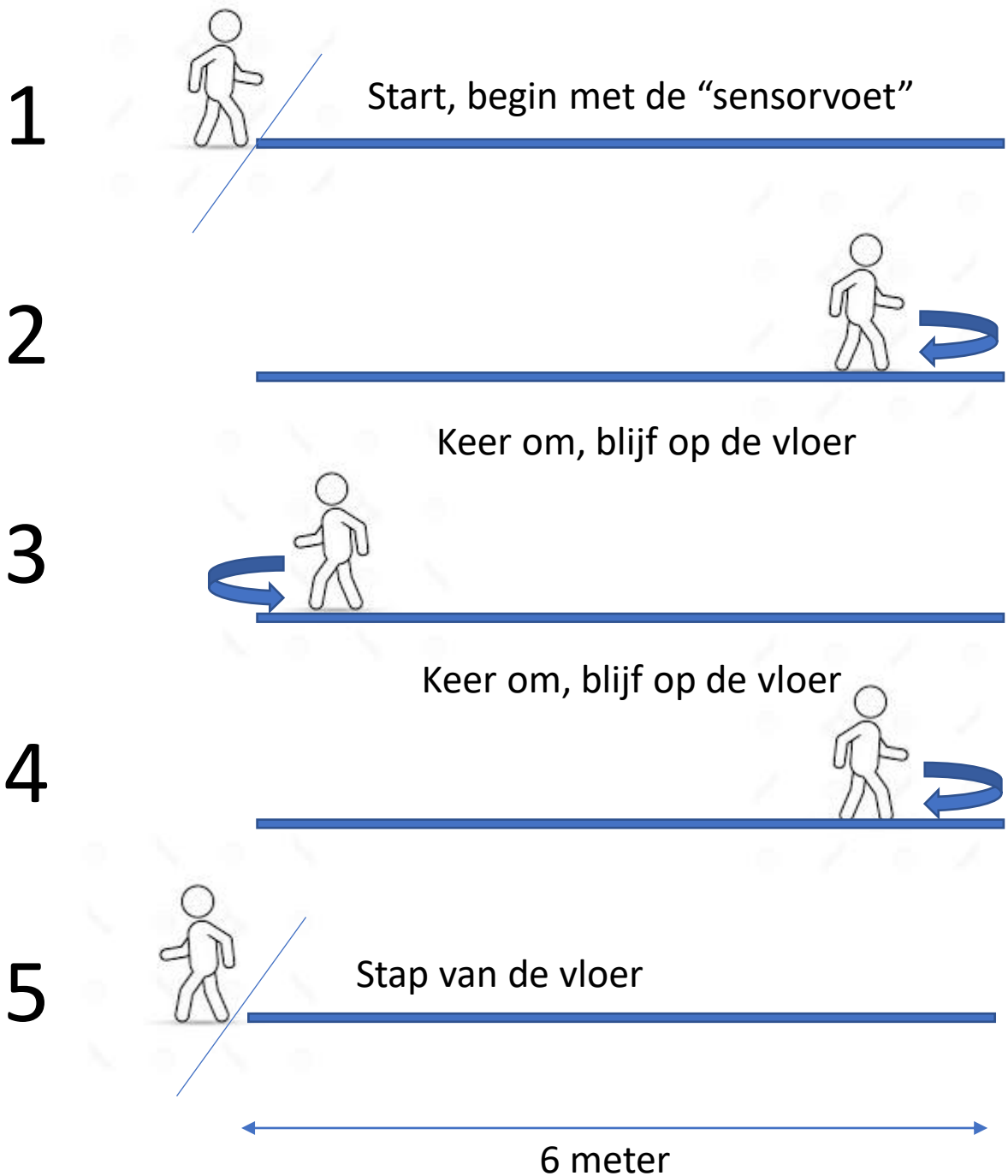

# Het koppelen van sensor en cliënt

Het koppelen van de loopsensor aan een gebruiker kan op 2 manieren:

1. Met de mobiele app door middel van QR-codes (Smart Floor ID's)
2. Vanuit de SF-VRP applicatie

Op de volgende pagina's staat een beknopte beschrijving van het koppelen van sensor en gebruiker.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de Handleiding Vitaliteit.

# Koppelen met de mobiele app

## Benodigheden

- Een smartphone of tablet (Android of iOS) met toegang tot internet waarop de app “SmartFloor Vitaliteit” geïnstalleerd is
- Inloggegevens voor de SF-VRP applicatie
- Een Smart Floor ID (QR code), of lijst van QR-codes van de cliënten die gemeten worden

## Vorbereiding

- Download de app “SmartFloor Vitaliteit” vanuit de App Store (Apple) of Play Store (Android)
- Installeer de app
- Maak een account aan, of log in (eenmalig)

## Voor ELKE gebruiker

- Scan uw QR-code (Smart Floor ID) of die van de cliënt van de lijst
- Scan de QR-code van de loopsensor (volgorde is niet van belang)
- Doe de loopsensor om bij uzelf of bij de cliënt, aan de rechterenkel
- Begin met lopen volgens het protocol

## Opmerking voor meerdere cliënten

Ook als u maar over 1 sensor beschikt, dient de QR-code hiervan voor elke cliënt opnieuw te worden gescand.

# Koppelen vanuit de SF-VRP applicatie

## Benodigheden

- Een PC, laptop of tablet met met toegang tot internet waarop Google Chrome geïnstalleerd is
- Inloggegevens voor de SF-VRP applicatie

## Vorbereiding

- In Google Chrome open [www.vitality.smartfloor.com](http://www.vitality.smartfloor.com)
- Login (eenmalig)
- Ga naar Smart Floor ValrisicoProfiel
- Scroll naar beneden en deselecteer het vakje “Vergrendel loopsensoren”

## Voor ELKE cliënt

- Selecteer de cliënt op basis van nummer of cliëntsymbool
- Kies de gewenste loopsensor uit de lijst. Als een gekozen sensor al aan een andere cliënt gekoppeld is, krijgt u een melding. Kies een andere sensor of ontkoppel eerst de sensor van de andere cliënt. Dit laatste kunt u doen door bij de andere cliënt sensor “-” uit de keuzelijst te kiezen.
- Doe de loopsensor om bij de cliënt, aan de rechterenkel
- Begin met lopen volgens het protocol